

布マスク
お洗濯
のススメ

正しい洗濯方法で、 布マスクを清潔に使用しましょう。

※微細な繊維を除去する為、新品の製品も一度洗濯してからのご利用をお勧めします。

用意するもの

衣料用の洗剤、清潔なタオル、大きめの桶、洗濯バサミ

使用不可

塩素系および酸素系漂白剤

※クレンゼの効果を長持ちさせるため、漂白剤はお控えください（下記試験対象外の為）



1. 桶に洗剤を入れます。
(一般的な衣料用洗剤だと水2Lに対し、0.7gが目安)
2. 洗剤を入れたら、スプーンなどで水に溶かします。



3. 桶にマスクを入れ、10分間放置します。
4. 10分後、軽く押し洗いをしましょう。
(もみ洗いは繊維を痛めるので×)



5. 洗い終わったら桶の水を流します。
6. 再び桶に水道水をため、マスクをすすぎましょう。
(クレンゼの効果を長持ちさせるため、漂白剤は×)



7. タオルで水気を取る。
8. 水気がなくなったら、陰干しをし、自然に乾かす。

布マスクは洗濯により縮む場合がございますが、品質には影響ありません。
クレンゼの抗菌・抗ウイルス効果は50回の洗濯まで効果持続が確認されています。
(試験方法：ISO18184)

ノムラアートプラント
http://www.nomura-art.com/cle_3dmask.php



上記は厚生労働省と経済産業省による
動画を元に解説しております。

<https://www.youtube.com/watch?v=AKNNZRRo74o>